

职业防护！



优安瓶 EasyNAT[®] 痰液安全处理

备案号：浙杭械备20170410号 专利号：ZL201720870833.2



无需二次开盖 保护医护人员

患者自行收集痰液至优安瓶中，实验人员无需开盖，通过优安瓶一步法简易操作，完成痰液液化，防御医护人员感染风险，防止院内交叉感染。

主要优点



有效隔绝接触，防御传染风险



简化实验操作，样本定量转移



无需直面痰液，改善工作体验



可直接离心，用于涂片和培养


优安瓶 EasyNAT[®] 痰液安全处理



实验员安全防护解决方案


患者

1. 旋开痰瓶盖，向瓶身中吐1-2口痰，旋紧瓶盖，交给医护人员。

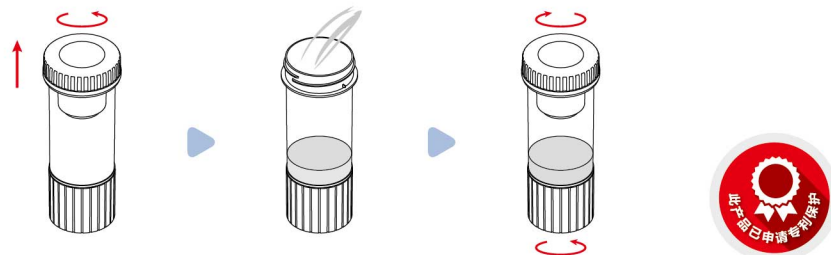


实验人员


1. 确认痰瓶盖拧紧，用大拇指按压痰瓶盖中央密封垫，刺破封口膜，使稀释液流入瓶身。

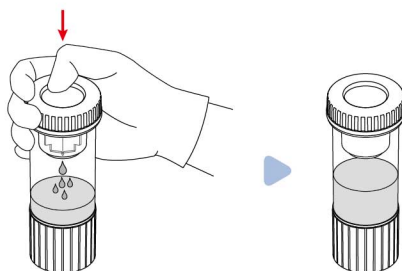


2. 涡旋震荡，使痰液与稀释液充分接触，静置15分钟。

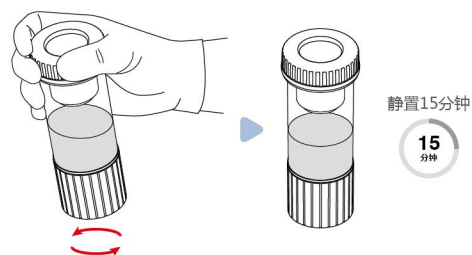

3. 痰液充分液化后，将痰瓶倒置，打开底盖，防止液化的痰液因气压从出口喷出。

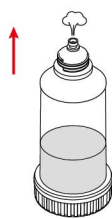

4. 将痰瓶出口对准收集液化痰液的容器，轻轻按捏瓶身，挤出液化痰液。

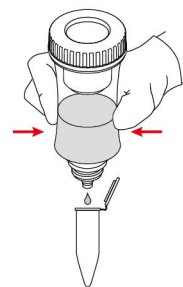

广泛的应用性

适用于各种

(结核菌的培养鉴定)

适用于各种

(结核菌的分子诊断)

离心后，适用于

(痰涂片和培养)



杭州优思达生物技术有限公司
Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd.

浙江省杭州市滨江区南环路3766号新世纪大厦8楼
电话：0571-88939388
邮箱：sales@bioustar.com

邮编：310053
传真：0571-88939378
网址：www.bioustar.com

